

Муфельная печь KDF 007 EX

KDF

Достигает 700°C за 11мин, за 14 минут достигает 800°C, максимальная температура 1100°C

Муфельная печь KDF 007 EX




Муфельная печь KDF 007 EX

Муфельная печь KDF 007 EX

Всего 11 минут требуется для разогрева до 700°C, 14 для достижения 800°C
Максимальная температура нагрева 1100°C.

Вместительная муфельная камера с достаточной скоростью нагрева.

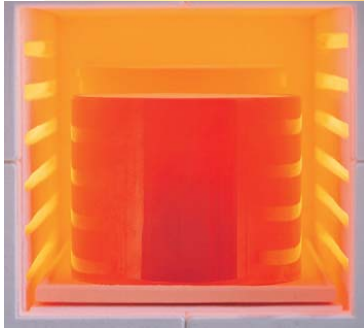

Вместительная муфельная камера

Размеры камеры достаточные для большинства задач и позволяют разместить сразу 2 опки Ø90 мм. или, к примеру, 35 опок Ø30мм. При этом высота камеры составляет 110мм., позволяя удобно размещать опки.

Быстрый разогрев и охлаждение.


В муфельной камере используется особый керамический изолирующий материал. Быстрый нагрев до 800°C за 20 мин., и до 1000°C за 29 мин., благодаря высокой эффективности нагрева и герметичности. Есть функция быстрого охлаждения.

Программа обжига разделена на 3 уровня.

Максимальная температура 1100 °C

3 уровня обжига: L, M, H - уровни.

Подходят для работы с любым видом паковочной массы. Есть возможность установки поддержания температуры, после остывания паковочной массы для Ti сплавов.

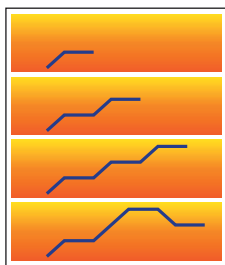

Спецификация

Напряжение питания:	Перемен. напряжение 220В. +/- 10%, 50/60 Гц.
Мощность потребляемая:	1,2 кВт.
Мощн. потребляемая в режиме ожидания:	Примерно 1,8 Вт.
Вес:	18кг.
Размер муфельной камеры:	120(Ш)х110(В)х220(Г), мм.
Габаритные размеры:	330(Ш)х330(В)х430(Г), мм.
Напряжение питания для катализатора:	Идентичное напряжение, максимум 300Вт.
Вместимость опок:	Ø90/2 шт, Ø30/35 шт.
Термодатчик:	Японский промышленный стандарт для керамики.
Максимальная температура:	1100°C.
Параметры внешней среды:	10-40°C, влажность 30-90% от точки росы.
Скорость нагрева:	11мин.(от комнатной темп. до 700°C, без нагрузки). 25мин.(от комнатной темп. до 1000°C, без нагрузки).
Количество программ:	10 программ.
Уровни на температурном графике:	1-3 уровня.
Программные единицы и пределы программных установок:	Предустановки таймера 0-99ч.50мин.(шаг 10мин.) L/M/H скорость нагрева: 1-20°C/мин.(шаг 1°C) L/M/H температура: 0-1100°C (шаг 1°C). L/M выдержка: 0-9ч.59мин.(шаг 1мин.). H выдержка: 0-99ч.50мин.(шаг 10мин.). M зуммер: Hi, Low, Off. Зуммер: Hi, Low, Off.
Аксессуары:	Керамическая подставка 1шт., Керамическая втулка (для катализатора) - 1шт.

Легкое управление с помощью операционной панели.

Из 10 программ обжига можно выбрать подходящую для любой паковочной массы. Выбор из перечня программ кнопками UP (увеличение) и DOWN (уменьшение). Легко распознать этап обжига по индикаторной лампочке на панели управления. Режим быстрого обжига можно включить нажатием кнопки QUICK, даже если в данный момент работает какая-либо программа обжига. Время до окончания отображается при нажатии кнопки BAL.TIME.



ООО «АТРИДЕНТ»

125195, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 96 А, офис 1

Телефон/факс: (499)745-63-01, 745-63-04, 745-63-06

E-mail: inbox@a3dent.ru

Редакция: Сентябрь 2019г.



2 000000 000000 000000